

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## Odběrová zkumavka na sliny

### I POPIS

Odběrová zkumavka na sliny od firmy SARSTEDT slouží k odběru slin a následné izolaci nukleových kyselin.

- Po doručení zkumavky o laboratoře vložte zkumavku včetně tamponu do centrifugy.
- Doporučené otáčky jsou 500 g po dobu 1 minuty. Po stočení by mělo být na dně zkumavky minimálně 500 µl tekutiny. Pokud tomu tak není, na tampon napipetujte 500 µl čisté vody a opakujte předchozí krok.
- Vnitřní zkumavku s tamponem vyhodte do infekčního odpadu
- Ze zkumavky odeberte 200 µl eluátu (slin) a pokračujte standartním postupem v izolaci RNA.